

An
alle Anwender von Infusionsmischbeuteln
der Fa. IMPROMEDIFORM GmbH

Lüdenscheid, 27. Juni 2012

Tiefkühlfähigkeit der Infusionsbeutel über 3 Monate

Die Tiefkühlfähigkeit der IMF Infusionsleerbeutel wurde in einem Langzeit-Test über 3 Monate (12 Wochen) mit den folgenden Parametern geprüft:

Im Test: 30 Stk. MF 1660 – 100ml EVA Infusionsbeutel
30 Stk. MF L660 – 100ml EVA Infusionsbeutel, lichtgeschützt

Füllung: 100ml Wasser

Tiefkühlparameter: $-30 \pm 2^\circ\text{C}$


Prüfungen: Die Beutel werden 1 X wöchentlich aufgetaut und auf Leckagen, Materialveränderungen und Funktionsfehler geprüft. Danach werden die Beutel wieder eingefroren.

Ergebnis:

Zeit	Datum	Ergebnis
00. Woche	09.01.2012	Start
01. Woche	16.01.2012	i.O.
02. Woche	23.01.2012	i.O.
03. Woche	30.01.2012	i.O.
04. Woche	06.02.2012	i.O.
05. Woche	13.02.2012	i.O.
06. Woche	20.02.2012	i.O.
07. Woche	27.02.2012	i.O.
08. Woche	05.03.2012	i.O.
09. Woche	12.03.2012	i.O.
10. Woche	19.03.2012	i.O.
11. Woche	26.03.2012	i.O.
12. Woche	02.04.2012	i.O.

Fazit: Aufgrund der durchgeführten Tests kann die Tiefkühlfähigkeit der IMF Infusionsleerbeutel über einen Zeitraum von 3 Monaten (12 Wochen) mit den o. g. Parametern bestätigt werden.

IMPROMEDIFORM GmbH

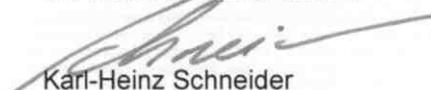

Karl-Heinz Schneider
Qualitätsmanagement

Gielster Stück 11
D - 58513 Lüdenscheid
Tel.: 0 23 51 - 55 06 10
Fax: 0 23 51 - 55 06 11

www.impromediform.de
info@impromediform.de

Sparkasse Lüdenscheid
BLZ 458 500 05, Konto-Nr. 100 040
Volksbank Lüdenscheid-Halver eG
BLZ 458 600 33, Konto-Nr. 85 999 000

Umsatzsteuer ID-Nr. DE 12 58 03 184
Steuernummer: 332 / 5751 / 1956
Geschäftsführer: Rolf Holthaus,
Marc Holthaus, Peter Esch, HRB 44 79

Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001: 2000